

NEURODYN

High Volt

Neurodyn High Volt es un estimulador eléctrico compacto con 2 canales de salida, corriente de alto voltaje es una corriente con pulsos gemelos de alta amplitud (alto voltaje) y corta duración.

Esto hace que la corriente sea más cómoda y sin efectos polares

12 protocolos preprogramados

- 20 protocolos privados



Indicaciones

- Curación de úlceras y heridas.
- Aumento de la circulación sanguínea local
- Mantener o aumentar el rango de movimiento
- Alivio sintomático del dolor crónico intratable
- Dolor agudo postraumático o postoperatorio
- Reducción del edema
- Control de la inflamación
- Drenaje linfático y vascular
- Relajación temporal del espasmo muscular.
- Prevención o retraso de la atrofia por desuso
- Electroporación de principios activos y fármacos.



Contraindicaciones

- Dispositivo electrónico implantado (ej.: marcapasos cardíaco, dispositivo de estimulación cerebral profunda etc.)
- No debe ser usado para el alivio del dolor local sintomático sin etiología conocida, a menos que un síndrome de dolor sea diagnosticado
- Sobre los nervios del seno carotideo, particularmente en pacientes con sensibilidad alterada al reflejo del seno carotideo
- Sobre el área cardíaca, pues puede provocar arritmias cardíacas
- Sobre la bóveda craneana
- Sobre o cerca de lesiones cancerígenas
- Sobre las áreas infectadas, inflamadas o sobre erupciones de la piel, tales como flebitis y tromboflebitis
- Sobre varices gruesas, por el riesgo de desplazamiento de trombos
- En pacientes con trombosis venosa profunda aguda (TVP)
- En la presencia de equipo de control electrónico (por ejemplo, los monitores cardíacos, alarmas de ECG etc.), que pueden no funcionar correctamente cuando el dispositivo de estimulación eléctrica está en uso.