

THORK

Ondas de choque Rehabilitación

El equipo cuenta con un generador de energía electromagnética y un aplicador radial que permite su uso de forma segura y eficaz tanto en terapia estética como en rehabilitación. Thork cuenta con una energía que alcanza hasta 200 mJ.

Cuenta con 25 protocolos pre-programados de tratamientos de rehabilitación tanto ortopédicos como musculares, todo ello basado en la evidencia científica.



Certificamos que el equipo, sus accesorios o componentes
no contienen ni utilizan material radioactivo



THORK

Ondas de choque

BENEFICIOS DEL EQUIPO

El equipo tiene 8 puntas, 4 de acero inoxidable y 4 de plástico. Los tamaños de punta son: 6 mm, 15 mm, 25 mm y 34 mm. Los de acero inoxidable, que llegan a estructuras más profundas, como el tejido adiposo, están indicados para:

- Terapias biomecánicas
- Puntos de reacción miofasciales.
- Trastornos de las inserciones de tendones
- Activación de los músculos y del tejido conjuntivo.
- Acupuntura.
- Mejora temporal de la circulación sanguínea local.



THORK

Ondas de choque

CONTRA-INDICACIONES

- Hemofilia u otros trastornos hemorrágicos
- Ingestión de anticoagulantes
- Sobre tejidos con inflamaciones agudas no diagnosticadas
- Sobre erupciones cutáneas u otro tipo de lesión de tejido
- Sobre área de polineuropatía en pacientes con Diabetes mellitus
- En pacientes sometidos a la terapia con cortisona hasta 6 meses antes de la primera sesión .
- Sobre áreas neoplásicas
- Directamente sobre implantes metálicos
- Sobre enfermedades vasculares oclusivas e insuficiencia circulatoria, como en casos de trombosis venosa profunda, flebitis, varices, arteriosclerosis obliterante y tromboangeitis obliterante
- Sobre los órganos reproductores
- En la presencia de infecciones sistémicas (sepsis, tuberculosis) o si la temperatura del paciente está elevada (fiebre)
- Dispositivo electrónico implantado (ej.: marcapasos cardíaco, dispositivo de estimulación cerebral profunda etc.)
- Sobre laminectomía o espina bífida
- Directamente sobre los senos carotídeos, ganglio estrellado o nervio vago localizados en el triángulo anterior del cuello;
- Sobre la región de pulmones, área cardíaca, grandes nervios y vasos, columna y cabeza
- Sobre o cerca de centros de crecimiento óseo hasta que el hueso haya terminado su crecimiento
- Áreas con tendencia a hemorragias tras trauma agudo o fractura



Certificamos que el equipo, sus accesorios o componentes no contienen ni utilizan material radioactivo